

TEST
RAPIDE



Anticorps Brucella Bovine

BF-BBAT-10
10 TESTS



Interprétation



Des Résultats

Résultat Négatif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Absente

Absence d'anticorps anti-Brucella détectable dans l'échantillon.




Résultat Positif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Visible

Présence d'anticorps anti-Brucella dans l'échantillon.

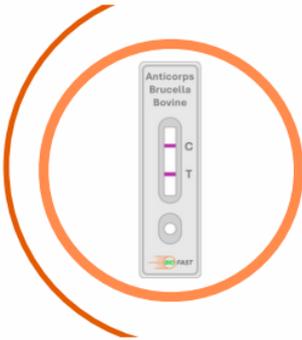

Résultat Invalide

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Absente

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Visible

L'échantillon doit être retesté.

