

FAST  
TEST



# Anticorps Brucella Canine

BF-CBAT-10  
10 TESTS



# Interprétation





## Des Résultats

### Résultat Négatif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Absente

Absence d'anticorps anti-Brucella détectable dans l'échantillon.

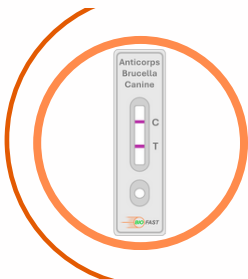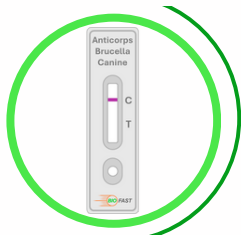

### Résultat Positif

Ligne contrôle (C): Visible

Ligne de test (T): Visible

Présence d'anticorps anti-Brucella dans l'échantillon.

### Résultat Invalide

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Absente

Ligne contrôle (C): Absente - Ligne de test (T): Visible

L'échantillon doit être retesté.

